

# PRÄANALYTIK MIKROBIOLOGIE

## KATHETERSPITZEN



### INDIKATOREN

- › Verdacht auf Katheter-assoziierte Infektionen

### MATERIALGEWINNUNG

- › Insertionsstelle desinfizieren
- › Katheter ziehen
- › Spitze (ca. 4–6 cm) abschneiden und in ein steriles Gefäß geben

### VORGEHENSWEISE

#### Gefäß mit Nährbouillon

- › Alle Keime angezchtet
- › Nachteil: semiquantitative Aussage nicht möglich

#### Gefäßährbouillonzusatz

- › Bei Kultur ist semiquantitative Keimzahlbestimmung (nach MAKI) möglich